

Knee stockings en Tubes, per paar

Meetpunten	Confectiematen					
	1	2	3	4	5	6
cD omvang onder de knie	28 - 35	31 - 38	34 - 41	37 - 44	40 - 47	43 - 50
cC grootste kuitomvang	30 - 37	33 - 40	36 - 43	39 - 46	42 - 49	45 - 52
cB₁ (alleen bij maatkousen)	25 - 28	27 - 30	29 - 33	32 - 36	35 - 39	38 - 42
cB omvang enkel	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31
cY hiel - wreeflijn	28 - 34	30 - 36	32 - 38	34 - 40	35 - 41	37 - 43
cA omvang voorvoet	19 - 23	21 - 25	23 - 27	25 - 29	27 - 31	29 - 33

Beenlengte cm

Gemeten vanaf de grond (blote voet) tot 1 cm onder de knieplooi.

kort been 34 - 38	kort	kort	kort			
lang been 39 - 49	lang	lang	lang	lang	lang	lang

Schoenmaat

kleine voet 36 - 40	klein	klein	klein			
grote voet 41 - 45	groot	groot	groot	groot	groot	groot

Kousen met voet indien noodzakelijk ook als maatkous leverbaar.

Hamstringkous, per stuk

Meetpunten	S	M	L	XL
cE 2 cm boven knieschijf	32 - 35	35 - 39	39 - 43	43 - 47
cG 1 cm onder bilplooï	43 - 49	47 - 54	52 - 59	57 - 63

Dijbeenlengte cm

Vanaf 2 cm boven de knieschijf (cE) tot 1 cm onder de bilplooï (cG).

kort dijbeen 25 - 30	kort	kort	kort	kort
lang dijbeen 31 - 36	lang	lang	lang	lang


Opmeten van confectiekousen; kousen met voet en tubes



1. Klant zit op een stoel, het onderbeen in 90 graden (haaks) t.o.v. de voet.
2. Begin met het opmeten van de kleinste beenomvang, net boven de enkelknobbels (**cB**)
 - Noteer de omvang in hele- of halve centimeters.
 - Zoek in de tabel bij **cB** (z.o.z.) die confectie kousmaat op die hiermee overeenstemt.
3. Meet dan de grootste omvang van de kuit op (**cC**)
 - Vervolgens meet u de omvang van het been op 1 cm onder de knieplooi (**cD**)

Vergelijk nu deze beide laatste maten (**cC** en **cD**) met de tabel die we eerder op grond van de **cB** maat hebben uitgekozen. Blijkt dat ook deze maten vallen binnen de tolerantiegrenzen van de confectietabel die op basis van de **cB** maat werd gekozen, dan is de confectiemaat bepaald.

- Nu meet u de lengte van het been vanaf de grond tot 1 cm onder de knieplooi. Tot 39 cm is er sprake van een korte kous, langer dan 39 cm uiteraard een lange kous. Slechts bij de confectiematen 1, 2 en 3 bestaat deze keuze. Vanaf maat 4 worden uitsluitend lange kousen geleverd.

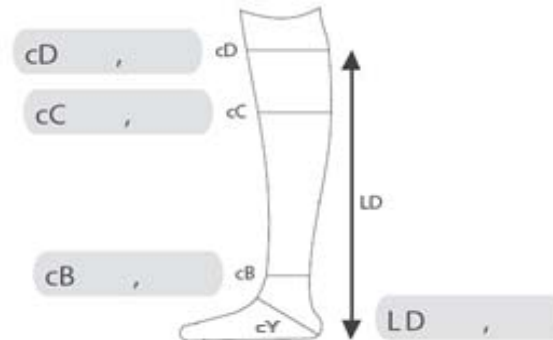

Extra voor de voetkousen

1. Wanneer u ziet dat de klant bijvoorbeeld een erg hoge wreef heeft dan is het ook zinvol de zgn. **cY** maat te meten. Dit is de omvangmaat vanaf hielbot gemeten over de wreef, daar waar het onderbeen t.o.v. de voet een hoek van 90 graden maakt, zie afbeelding.
2. Daarna beoordeelt u of de uiteindelijke confectiemaat ook overeenstemt met de schoenmaat van de cliënt. Deze is standaard voor alle confectiematen 41-45. Bij de maten 1, 2 en 3 bestaat ook de mogelijkheid om een kleine voet te bestellen, 36-40.
3. Blijkt dat de verschillende maten van het been op geen enkele wijze passen binnen één maatschema, of is er sprake van grote omvangverschillen tussen beide benen onderling, dan zullen naar maat gebreide kousen het alternatief moeten zijn.

N.B. Wanneer u moet kiezen uit 2 maten dan is de maat waar de kuit het meest centraal binnen een schema past de juiste keuze.

Opmeten van de Hamstringkous

1. Klant staat rechtop. Omvang van het bovenbeen wordt opgemeten op **2 cm boven de knieplooi (cE)**.
2. Meet dan de omvang van het bovenbeen, ongeveer **1 cm onder de bilplooi (cG)**.
3. Daarna wordt de lengte tussen **cE** en **cG** opgemeten, en de maat bepaald, **kort** of **lang**.